

beurer

HK 145 Cosy Weight Green Planet



- CS** Vyhřevná poduška
Návod k použití 3
- SK** Elektrická poduška
Návod na použitie 8





STANDARD
100

Special Articles
24.HDE.72388
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



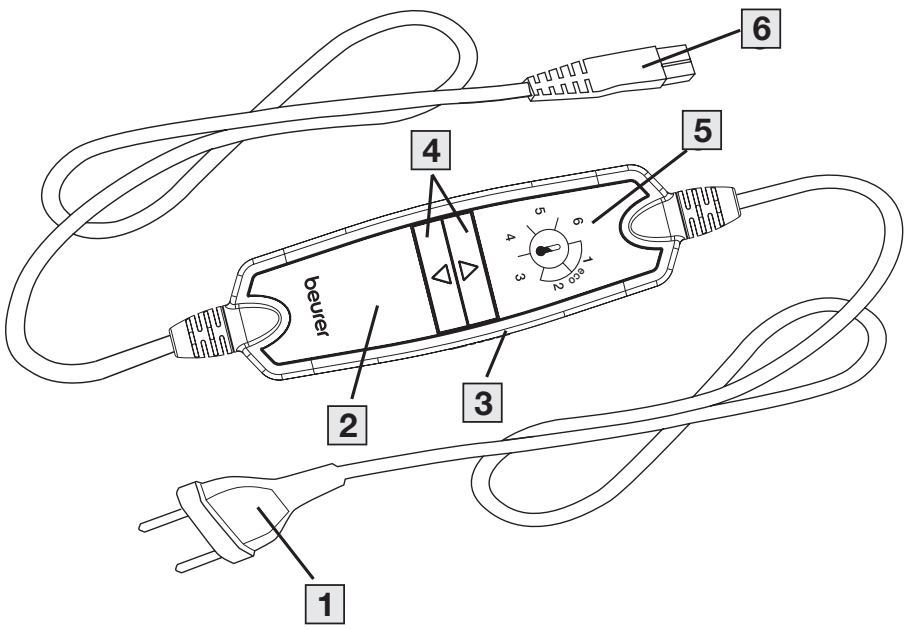

 **Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.**

OBSAH

1. Obsah balení	3
2. Vysvětlení symbolů	3
3. Důležité pokyny	
Uschovejte pro pozdější použití	4
4. Použití v souladu s určením	5
5. Popis přístroje	5
6. Ovládání	5
6.1 Bezpečnost	5
6.2 Uvedení do provozu	6
6.3 Zapnutí	6

6.4 Nastavení teploty	6
6.5 Automatika vypnutí	6
6.6 Vypnutí	6
7. Čištění a údržba	6
8. Co dělat v případě problémů?	6
9. Uložení	6
10. Likvidace	7
11. Technické údaje	7
12. Záruka/servis	7

1. OBSAH BALENÍ









Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu. Více informací o Green Planet společnosti Beurer a trvalé udržitelnosti je uvedeno na následujícím QR kódu.


















- 1 výhřevná poduška
- 1 přepínač
- 1 návod k použití



2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

 NEBEZPEČÍ
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.
 VAROVÁNÍ
Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.
 POZOR
Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.
 UPOZORNĚNÍ
Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.
 Informace o výrobku Upozornění na důležité informace
 Čtete pokyny
 (Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem
 Výrobce

 Označení CE	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
 Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka	
 Produkt a součásti obalu roztrháte a zlikvidujete je v souladu s místními předpisy.	
 Přístroj třídy ochrany II	
 Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU	
 Nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky)	
 UK CA Označení posouzení shody pro Spojené království	
 Symbol dovozece	
 maximální teplota praní 30 °C velmi šetrný proces	
 Nebělit	
 Nečistit chemicky	
 Nezapichovat žádné špendlíky!	
 Nežehlit	
 Nesušit v sušičce prádla (tumbler)	
 Nepoužívejte podložku, jestliže je přehnutá nebo složená!	
 GRS – standard nezávislé certifikace recyklovaného materiálu	
 Textílie použité u tohoto přístroje splňují přísné požadavky na zdravotní nezávadnost podle normy Oeko Tex® Standard 100, což bylo prokázáno výzkumným ústavem Hohenstein.	
Odkaz pro chytrý telefon na produkty Beurer Green Planet a informace o trvalé udržitelnosti	

3. DŮLEŽITÉ POKYNY USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

▲ VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen k ochraně vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, ale i k ochraně produktu. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a přeďte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Tuto výhřevnou podušku nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, které neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s onemocněním projevujícím se změnami na kůži nebo osoby s jizvami na kůži v oblasti aplikace, po užití utišujících léků nebo po požití alkoholu).
- Tuto výhřevnou podušku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tato výhřevná poduška smí být dětmi, které jsou starší než 3 roky, ale mladší než 8 let, používána pouze pod dozorem, přepínač přitom musí být nastaven na minimální teplotu.
- Tuto výhřevnou podušku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání výhřevné podušky a pokud chápou případná rizika.
- Děti si s výhřevnou poduškou nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Tato výhřevná poduška není určena pro použití v nemocnicích.
- Tato výhřevná poduška je určena pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Nezapichujte špendlíky.
- Nepoužívejte podušku, jestliže je přehnutá nebo složená.
- Nepoužívejte podušku, jestliže jste mokří.
- Tuto výhřevnou podušku lze použít pouze ve spojení s přepínačem uvedeným na etiketě.
- Tato výhřevná poduška se smí připojovat pouze k síťovému napětí uvedenému na etiketě.
- Jestliže budete výhřevnou podušku používat několik hodin, doporučujeme nastavit na přepínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí zahřáté části těla a následně případným popáleninám pokožky.
- Elektrická a magnetická pole vycházející z této výhřevné podušky mohou za určitých okolností rušit funkci kardiostimulátoru. Nedosahují však zdaleka hraničních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT. Před použitím této výhřevné podušky se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Za kabely netahejte, nekruťte s nimi nebo je nelámejte.
- Kabel a přepínač výhřevné podušky mohou při nevhodném uložení představovat nebezpečí z hlediska zachycení, zakopnutí, uskrčení nebo

- špatného došlápnutí. Uživatel musí obecně zajistit bezpečné umístění všech kabelů.
- Tuto výhřevnou podušku je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud se takové známky objeví, výhřevná poduška nebyla správně používána a již se neohřívá, je třeba ji před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.
 - Pokud z důvodu poškození výrobku dojde k uvolnění skleněných korálků, výrobek již nepoužívejte. Skleněné korálky nikdy nepolykejte. Při spolknutí skleněných korálků okamžitě vyhledejte lékaře.
 - V žádném případě nesmíte výhřevnou podušku (vč. příslušenství) otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit její správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
 - Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu výhřevné podušky, musíte ho vyřadit a odstranit. Pokud ho nelze odpojit, musíte vyřadit a odstranit celou výhřevnou podušku.
 - Přepínače a vedení nevystavujte přímému slunečnímu záření.
 - Jestliže je tato výhřevná poduška zapnutá, nesmí se na ni pokládat
 - žádné předměty s ostrými hranami,
 - žádné zdroje tepla, např. ohřívací láhev, jiná výhřevná poduška apod.
 - Elektronické součástky v přepínači se při používání výhřevné podušky zahřívají. Přepínač proto nesmí být zakrytý nebo nesmí ležet na výhřevné podušce, pokud je tato zapnutá.

- Před uskladněním nechte výhřevnou podušku vychladnout. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.
- Během skladování na výhřevnou podušku nepokládejte žádné předměty, aby nedošlo k jejímu výraznému ohnutí. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.
- Věnujte pozornost pokynům uvedeným v následujících kapitolách: Obsluha, čištění a údržba, uložení.
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

4. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

▲ POZOR

Tato výhřevná poduška je určena pro zahřívání lidského těla.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné náčrtky jsou zobrazeny na straně 2.

- 1 Síťová zástrčka
- 2 Přepínač
- 3 Posuvný spínač (ZAP = 1 / VYP = 0)
- 4 Tlačítka pro nastavení teploty
- 5 Osvětlený ukazatel teplotních stupňů
- 6 Zásuvková spojka

6. OVLÁDÁNÍ

6.1 Bezpečnost

UPOZORNĚNÍ


- Výhřevná poduška je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Automatickým vypnutím zabraňuje tato technologie snímačů v případě závady přehřátí výhřevné podušky po celé ploše. Jestliže BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM vypne výhřevnou podušku, přestanou v zapnutém stavu svítit teplotní stupně.
- Respektujte prosím, že po závadě již výhřevnou podušku nelze z důvodu bezpečnosti používat a je nutno ji odeslat na uvedenou adresu servisu.
- Vadnou výhřevnou podušku v žádném případě nepřipojujte k jinému přepínači stejného typu. Bezpečnostní systém v přepínači by rovněž aktivoval finální odpojení.

6.2 Uvedení do provozu

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že se výhřevná poduška při používání neshmula ani se nevytvořily žádné záhyby.

1. Nejdříve propojte přepínač s topným tělesem tak, že zásuvkovou spojku spojíte dohromady.
2. Pak zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

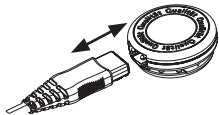

6.3 Zapnutí

Nastavte posuvný spínač [3] na pravé straně přepínače na stupeň „1“ (ZAP) – viz obr. přepínače. V zapnutém stavu je ukazatel teplotních stupňů osvětlený.



Pro rovnoměrné rozložení náplně polštář pravidelně protřepávejte.

6.4 Nastavení teploty

Teplotu zvýšíte stisknutím tlačítka Δ [4]. Teplotu snížíte stisknutím tlačítka ∇ [4].

Stupeň 1: Minimální teplota
Stupeň 2–5: Individuální teplota
Stupeň 6: Maximální teplota



Nejrychlejšího zahřátí výhřevné podušky dosáhnete tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň.



Tato výhřevná poduška je vybavena funkcí rychlého zahřátí, která umožňuje rychlejší zahřívání během prvních 10 minut.

6.5 Automatika vypnutí

Tato výhřevná poduška je vybavena funkcí automatického vypínání. Přívod tepla se přibližně 90 minut po zapnutí výhřevné podušky zastaví. Část zobrazených teplotních stupňů na přepínači začne blikat. Abyste opět mohli obnovit funkci výhřevné podušky, nastavte nejdříve postranní posuvný spínač [3] na stupeň „0“ (VYP). Asi po 5 sekundách můžete výhřevnou podušku opět zapnout.



VAROVÁNÍ

Jestliže budete výhřevnou podušku používat několik hodin, doporučujeme nastavit na přepínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí zahřáté části těla a následně případným popáleninám pokožky.

6.6 Vypnutí

Nastavte postranní posuvný spínač [3] na přepínači na stupeň „0“ (VYP), výhřevná poduška se vypne. Ukazatel teplotních stupňů již nesvítí.



Jestliže nebudete výhřevnou podušku používat, nastavte postranní posuvný spínač [3] pro ZAP/VYP na stupeň „0“ (VYP) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím i přepínač od výhřevné podušky.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím i přepínač od výhřevné podušky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

Přepínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

- Pro čištění přepínače použijte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Drobné znečištění výhřevné podušky můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým pracím prostředkem.

UPOZORNĚNÍ

Respektujte, že se výhřevná poduška nesmí chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce mandlovat nebo žehlit. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.

- Tuto výhřevnou podušku lze prát v pračce.
- Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu). Používejte jemný prací prostředek a dodržujte dávkování podle údajů výrobce.

UPOZORNĚNÍ

Nezapomeňte prosím, že příliš časté praní výhřevnou podušku velmi zatěžuje. Výhřevná poduška by se měla během celé své životnosti prát v pračce maximálně 10krát.

- Ihned po vyprání rozprostřete ještě vlhkou výhřevnou podušku na stojan na prádlo a nechte ji uschnout.

UPOZORNĚNÍ

- K připevnění výhřevné podušky na stojanu nepoužívejte žádné kuličky na prádlo apod. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.
- Přepínač propojte s výhřevnou poduškou teprve tehdy, když je úplně suchá zásuvková spojka i výhřevná poduška. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.

VAROVÁNÍ

V žádném případě nezapínejte výhřevnou podušku proto, aby se vysušila! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

8. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

Problém	Teplotní stupně nesvítí, zatímco
	- je přepínač řádně propojen s výhřevnou poduškou - je síťová zástrčka propojena s funkční zásuvkou - postranní posuvný spínač na přepínači je nastaven na stupni „1“ (ZAP)
Možná příčina	Bezpečnostní systém výhřevnou podušku nezvratně vypnul.
Odstranění problému	Zašlete výhřevnou podušku a přepínač do servisu.

9. ULOŽENÍ

Pokud nebudete výhřevnou podušku delší dobu používat, doporučujeme ji uskladnit v originálním obalu. Odpojte zásuvkovou spojku a tím i přepínač od výhřevné podušky.

10. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starost.



11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Viz typový štítek na výhřevné podušce.

12. ZÁRUKA/SERVIS

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte výstražné a bezpečnostné pokyny. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

OBSAH

1. Obsah balenia	8	6.4 Nastavenie teploty	11
2. Vysvetlenie symbolov	8	6.5 Automatické vypnutie	11
3. Dôležité pokyny		6.6 Vypnutie	11
Uschovajte na neskoršie použitie	9	7. Čistenie a starostlivosť	11
4. Účel použitia	10	8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	11
5. Popis prístroja	10	9. Skladovanie	12
6. Obsluha	10	10. Likvidácia	12
6.1 Bezpečnosť	10	11. Technické údaje	12
6.2 Uvedenie do prevádzky	11	12. Záruka/servis	12
6.3 Zapnutie	11		

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte obsah balenia a overte, či kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákaznickeho servisu. Viac informácií o Beurer Green Planet a udržateľnosti nájdete pod nasledujúcim QR kódom.

- 1 elektrická poduška
- 1 spínač
- 1 návod na použitie



2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku zariadenia sa používajú nasledovné symboly:

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom bude smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa zariadenie alebo niečo v jeho okolí poškodiť.



Informácia o výrobku

Odkaz na dôležité informácie



Prečítajte si pokyn



Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom

	Výrobca
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Trieda ochrany II
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU
	Nesmú ju používať veľmi malé deti (0 – 3 roky).
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva
	Symbol importéra
	maximálna teplota prania 30 °C velmi šetrný proces
	Nebielte
	Nečistite chemicky
	Nezapichávejte ihly!
	Nežehlite
	Nesušte v sušičke bielizne
	Nepoužívajte zloženú alebo zhrnutú!
	GRS – štandard na nezávislú certifikáciu recyklácie materiálu
	Textílie použité v tomto prístroji spĺňajú vysoké humánno-ekologické požiadavky štandardu Oeko-Tex® 100, čo potvrdil aj výskumný inštitút Hohenstein.



3. DÔLEŽITÉ POKYNY USCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE

▲ VAROVANIE

- Nerešpektovanie nižšie uvedených upozornení môže mať za následok osobné alebo vecné škody (zásah elektrickým prúdom, kožné popáleniny, požiar). Nasledovné bezpečnostné upozornenia a výstrahy pred nebezpečenstvami slúžia nielen na ochranu vášho zdravia, resp. zdravia iných, ale aj na ochranu výrobku. Preto dodržiavajte tieto bezpečnostné upozornenia a pri postúpení výrobku iným osobám im odovzdajte aj tento návod.
- Túto elektrickú podušku nesmú používať osoby, ktoré nepocitujú teplo ani iné osoby vyžadujúce si ochranu, ktoré nevedia reagovať na prehriatie (napr. diabetici, osoby s určitými kožnými ochoreniami, rozsiahlymi jazvami v oblasti použitia, osoby po požití liekov na tlmenie bolesti alebo alkoholu).
- Táto elektrická poduška sa nesmie používať u veľmi malých detí (0 – 3 roky), pretože tieto nedokážu reagovať na prehriatie.
- Elektrickú podušku môžu používať deti, ktoré sú staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov, len pod dohľadom, pričom spínač musí byť vždy nastavený na minimálnu teplotu.
- Túto elektrickú podušku môžu používať od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami ale-

bo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom a ak boli poučené o bezpečnom používaní elektrickej podušky a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.

- Deti sa nesmú hrať s elektrickou poduškou.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Táto elektrická poduška nie je určená na používanie v nemocniciach.
- Táto elektrická poduška je určená iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Nezapichávajújte ihly.
- Nepoužívajte poskladanú alebo zhrnutú.
- Nepoužívajte za mokra.
- Táto elektrická poduška sa smie používať iba so spínačom uvedeným na etikete.
- Táto elektrická poduška sa smie pripájať iba na sieťové napätie, ktoré je uvedené na etikete.
- Ak sa elektrická poduška používa viac hodín, odporúčame na spínači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby sa predišlo prehriatiu zohriatej časti tela a prípadnému následnému popáleniu kože.
- Elektrické a magnetické polia produkované touto elektrickou poduškou môžu za určitých okolností ovplyvniť funkciu vášho kardiostimulátora. Hodnoty týchto polí sa však nachádzajú hlboko pod hraničnými hodnotami: intenzita elektrického poľa: max. 5 000 V/m, intenzita magnetického poľa: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 0,1 mT. Pred použitím tejto elektrickej

- podušky sa preto poraďte s lekárom a s výrobcou svojho kardiostimulátora.
- Neťahajte za káble, ani ich nepretáčajte a ostro neohýbajte.
 - Kábel a spínač elektrickej podušky môžu v prípade nesprávneho umiestnenia predstavovať nebezpečenstvo zachytenia, strangulácie, potknutia alebo zakopnutia. Používateľ musí zaistiť, aby boli nadbytočné káble a káble všeobecne bezpečne uložené.
 - Elektrickú podušku je potrebné často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa takéto známky vyskytnú alebo ak bola elektrická poduška používaná nesprávne, príp. ak sa poduška nezohrieva, musí ju pred opätovným zapnutím najskôr skontrolovať výrobca.
 - Ak sa v dôsledku poškodenia výrobku uvoľnia sklenené guľôčky, výrobok prestaňte používať. Nikdy neprehitajte sklenené guľôčky. V prípade prehĺtnutia sklenených guľôčok okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Elektrickú podušku (vrát. príslušenstva) nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nebude zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.
 - V prípade, že sa poškodí elektrický prívodný kábel tejto elektrickej podušky, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, musí sa zlikvidovať elektrická poduška.
 - Spínače a vedenia nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
 - Keď je táto elektrická poduška zapnutá, nesmú sa na ňu ukladať

- predmety s ostrými hranami,
- žiadne zdroje tepla, ako ohrievacia fľaša, elektrická poduška a pod.
- Elektronické súčiastky v spínači sa pri používaní elektrickej podušky zohrievajú. Spínač sa preto nesmie zakrývať a nesmie byť položený na elektrickej poduške, ak je táto v prevádzke.
- Pred uskladnením nechajte elektrickú podušku vychladnúť. Inak sa môže elektrická poduška poškodiť.
- Počas skladovania na elektrickú podušku nekladte žiadne predmety, aby ste predišli tomu, že sa elektrická poduška ostro zalomí. Inak sa môže elektrická poduška poškodiť.
- Bezpodmienečne dbajte na pokyny týkajúce sa nasledujúcich kapitol: Obsluha, čistenie a starostlivosť, uchovávanie.
- V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa obráťte na náš zákaznícky servis.

4. ÚČEL POUŽITIA

▲ POZOR

Táto elektrická poduška je určená iba na zohrievanie ľudského tela.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

- 1 Zástrčka
- 2 Spínač
- 3 Posuvný spínač (ZAP. = I/VYP. = 0)
- 4 Tlačidlá na nastavenie teploty
- 5 Osvetlený ukazovateľ teplotných stupňov
- 6 Zástrčkové spojenie

6. OBSLUHA

6.1 Bezpečnosť

UPOZORNENIE

- Elektrická poduška disponuje BEZPEČNOSTNÝM SYSTÉMOM. Táto snímacia technika zabraňuje prehriatiu elektrickej podušky po celej jej ploche prostredníctvom automatického vypnutia v prípade poruchy. Ak BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM elektrickú podušku vypol, teplotné stupne už v zapnutom stave nebudú viac osvetlené.


- Upozorňujeme, že elektrickú podušku nie je v prípade poruchy možné z bezpečnostných dôvodov ďalej používať a je potrebné ju zaslať na uvedenú servisnú adresu.
- Nikdy nepripájajte chybnú elektrickú podušku k inému spínaču rovnakého typu. To by taktiež viedlo ku konečnému vypnutiu bezpečnostného systému v spinači.

6.2 Uvedenie do prevádzky

UPOZORNENIE

Uistite sa, že sa elektrická poduška pri používaní nezhríňa alebo nevytvára záhyby.

1. Najskôr pripojte spínač k vyhrievaciemu telesu tak, že spojíte zástrčkové spojenie.
2. Potom zasunúť sieťovú zástrčku do zásuvky.

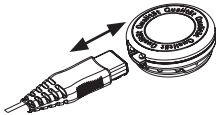

6.3 Zapnutie

Posuvný spínač **3** na pravej strane spínača nastavte na stupeň „I“ (ZAP) – pozri obr. Spínač. V zapnutom stave je ukazovateľ teplotných stupňov osvetlený.

- i** Na rovnomerné rozdelenie náplne vankúš jemne pravidelne potriasajte.

6.4 Nastavenie teploty

Na zvýšenie teploty stlačte tlačidlo **△ 4**. Na zníženie teploty stlačte tlačidlo **▽ 4**.

Stupeň 1: minimálna teplota

Stupeň 2 – 5: individuálna teplota

Stupeň 6: maximálna teplota

- i** Najrýchlejšie zohriatie elektrickej podušky dosiahnete tak, že ju najskôr nastavíte na najvyšší teplotný stupeň.

- i** Táto elektrická poduška disponuje funkciou rýchleho zahriatia, ktorá vedie k rýchlemu zahriatiu v rámci prvých 10 minút.

6.5 Automatické vypnutie

Táto elektrická poduška je vybavená automatickým vypnutím. Toto zastaví prívod tepla cca 90 minút po uvedení elektrickej podušky do prevádzky. Časť zobrazených teplotných stupňov na spinači potom začne blikať. Aby bolo možné opätovne uviesť elektrickú podušku do prevádzky, prepnite bočný posuvný spínač **3** najskôr na stupeň „0“ (VYP). Po približne 5 sekundách je možné opätovné zapnutie.



VAROVANIE

Ak sa elektrická poduška používa viac hodín, odporúčame na spinači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby sa predišlo prehriatiu zohriatej časti tela a prípadnému následnému popáleniu kože.

6.6 Vypnutie

Prepnite bočný posuvný spínač **3** na spinači na stupeň „0“ (VYP), aby ste elektrickú podušku vypli. Ukazovateľ teplotných stupňov potom už nie je osvetlený.

- i** Ak elektrickú podušku nepoužívate, prepnite bočný posuvný spínač **3** na zapnutie/vypnutie na stupeň „0“ (VYP) a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne odpojte zástrčkové spojenie, a tým aj spínač od elektrickej podušky.

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

VAROVANIE

Pred čistením vždy najskôr odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne odpojte zástrčkové spojenie, a tým aj spínač od elektrickej podušky. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE

Spínač nesmie prísť nikdy do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. Inak sa môže poškodiť.

- Na čistenie spínača používajte suchú nechlpatú utierku. Na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Malé škvrny na elektrickej poduške je možné odstrániť navlhčenou utierkou a prípadne s malým množstvom jemného pracieho prostriedku.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme, že elektrická poduška sa nesmie chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke, manglovať ani žehliť. Inak sa môže elektrická poduška poškodiť.

- Túto elektrickú podušku je možné prať v pračke.
- Práčku nastavte na zvlášť šetrný prací program na 30 °C (prací program na vlnu). Používajte jemný prací prostriedok a dávkujte ho podľa údajov výrobcu.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme, že príliš časté pranie elektrickej podušky zaťažuje. Elektrická poduška by sa preto mala v rámci celej svojej životnosti prať v pračke max. 10-krát.

- Hneď po vypraní ešte mokrú elektrickú podušku rozlohnite na pôvodný rozmer a nechajte ju rozprestretú naplocho vysušiť na sušiaci na bielizeň.

UPOZORNENIE

- Na upevnenie elektrickej podušky na sušiaci na bielizeň nepoužívajte štipce na bielizeň a pod. Inak sa môže elektrická poduška poškodiť.
- Spínač pripojte k elektrickej poduške až vtedy, keď sú zástrčkové spojenie a elektrická poduška kompletne vyschnuté. Inak sa môže elektrická poduška poškodiť.

VAROVANIE

Elektrickú podušku v žiadnom prípade nezapínajte za účelom vysušenia! V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

8. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém	Teplotné stupne nie sú osvetlené, keď
	<ul style="list-style-type: none"> - je spínač kompletne spojený s elektrickou poduškou, - je sieťová zástrčka zapojená do funkčnej zásuvky, - bočný posuvný spínač na spinači je na stupni „I“ (ZAP).
Možná príčina	Bezpečnostný systém nenávratne vypol elektrickú podušku.
Odstránenie	Elektrickú podušku a spínač zašlite do servisu.

9. SKLADOVANIE

Ak elektrickú podušku dlhší čas nepoužívate, odporúčame ju uskladniť v originálnom obale. Na tento účel odpojte zástrčkové spojenie a tým aj spínač od elektrickej podušky.

10. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom.

Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Pozri etiketu s typovým štítkom na elektrickej poduške.

12. ZÁRUKA/SERVIS

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Omyl a zmeny vyhradené

